



## FZWK II

Die effektive  
Raumvernebelung

**HEYER**   
MEDICAL AG

# FZWK II

## Die effektive Raumvernebelung


Die **FZWK II** (Fein-Zerstäuber-Wand-Kombination) ist ein druckluftbetriebenes Gerät zur Rauminhalation (Feuchtinhalation). Dabei wird die komprimierte Druckluft von einem externen Kompressor oder einer zentralen Gasversorgung geliefert.

Die Feuchtinhalation mit Sole oder Medikament wird über ein mechanisches Düsensystem realisiert. Der von der Düse erzeugte Nebel wird aus dem Vorratsgefäß zur Inhalation in den Raum abgegeben. Der Patient hat also keinen direkten Kontakt zum Aerosolzeuger, sondern nimmt den Nebel indirekt durch Einatmen der aerosolträchtigen Atmosphäre im Inhalationsraum ein.

Mit der **FZWK II** können alle Medikamente und / oder Heilmittel, die für eine inhalationstherapeutische Behandlung der Atemwege in Frage kommen, vernebelt werden:

- Sole
- ölhaltige Medikamente
- ätherische Öle
- wasserlösliche Medikamente (können Sole beigemischt werden)

Durch den modularen Aufbau des Gerätes ist eine individuelle Anpassung der Verneblungsleistung an verschiedene Raumgrößen möglich. Dieses wird durch die Adaption einer vorbestimmten Anzahl von Aerosolbefeuchtern realisiert.

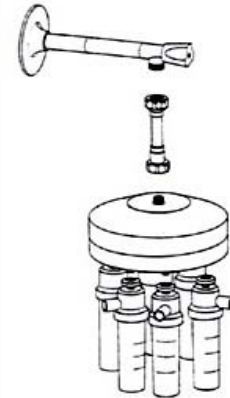

	Raumgröße/m <sup>3</sup>	Anzahl Befeuchter
Applikation 1	12	2
Applikation 2	24	4
Applikation 3	36	6

## Bestell-Daten

- 502 - 0000 FZKW II, kpl. für Deckenmontage  
ohne Aerosolbefeuchter und Verschlusskappen
- 502 - 0001 FZKW II, kpl. für Wandmontage  
ohne Aerosolbefeuchter und Verschlusskappen
- 502 - 1000 Aerosolbefeuchter, in gewünschter Anzahl  
bestellen 2,4,6x
- 033 - 1022 Verschlusskappe

**HEYER**   
**MEDICAL AG**

CARL-HEYER-STRASSE 1-3  
D-56130 BAD EMS  
TEL: 02603/791-3 - FAX: 02603/70424  
EMAIL: INFO@HEYERMEDICAL.DE  
INTERNET: WWW.HEYERMEDICAL.DE